

- Este es un producto sanitario que puede adquirirse sin receta médica.
- Lea todo el prospecto detenidamente: contiene información importante para el consumidor.
- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Para más información o asesoramiento, consulte a su médico y/o farmacéutico.
- Si la sintomatología persiste después de un cierto tiempo, consulte a su médico.

Cicatridina®

SAL SÓDICA DE ÁCIDO HIALURÓNICO 5 mg
óvulos vaginales

COMPOSICIÓN

Sal sódica de ácido hialurónico (5 mg), extracto lipólico de centella asiática, extracto lipólico de caléndula, extracto lipólico de aloe vera, aceite esencial de melaleuca, glicéridos semisintéticos, BHT.

PRESENTACIÓN

El envase de venta contiene 10 óvulos de 2 g para uso vaginal.

QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA

CICATRIDINA óvulos vaginales desempeña su actividad gracias a la presencia de ácido hialurónico, un mucopolisacárido que se encuentra abundantemente distribuido en numerosos tejidos corporales. Gracias a su capacidad para retener agua, el ácido hialurónico forma una película que hidrata, acelera y mejora el proceso de reepitelización y reparación de los tejidos.


INDICACIONES

Tratamiento adyuvante de procesos reparadores en condiciones atróficas y distróficas de la mucosa vaginal. Contribuye a la cicatrización en el posparto, en cirugía ginecológica, en casos de distrofia derivados de quimioterapia y radiaciones ionizantes. Tratamiento de la sequedad vaginal de diversos tipos.

CÓMO UTILIZARLO

Lávese las manos antes y después de utilizar el producto sanitario.

1. separe un óvulo del blíster usando la línea precortada
2. extraiga el óvulo tirando de las dos hojas del blíster
3. sujete el óvulo con la punta de los dedos
4. póngase en posición supina e introduzca el óvulo profundamente en la vagina.

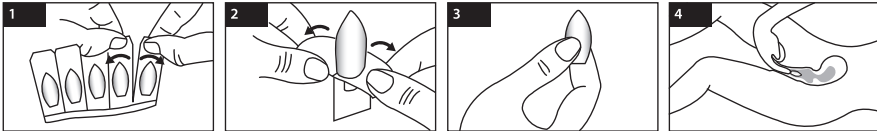

Adultos: utilice un óvulo al día o según prescripción médica, preferentemente por la noche antes de acostarse para evitar derrames. Evite sostener el óvulo vaginal entre los dedos durante demasiado tiempo, ya que podría disolverse.

La duración del uso depende de la evolución de los síntomas; si es necesario CICATRIDINA óvulos vaginales puede utilizarse durante periodos rolongados, en cualquier caso después de 30 días de uso continuado interrumpir el tratamiento durante una semana.

CUÁNDO NO DEBE UTILIZARSE

No debe utilizarse en caso de hipersensibilidad individual a uno de los componentes del producto.

INTERACCIONES CON OTROS PRODUCTOS

Se desconocen interacciones con otros productos; por lo tanto, se recomienda que consulte a su médico antes de utilizar CICATRIDINA óvulos vaginales junto con otros productos sanitarios o medicamentos de uso vaginal.

EFFECTOS NO DESEADOS

El empleo de cualquier producto de uso tópico, especialmente si es prolongado, puede causar sensibilización. Si esto ocurre, o si se observan otros efectos secundarios, suspenda el tratamiento y consulte a su médico o farmacéutico.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

El producto es solo para uso vaginal. Mantenga fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos. No lo trague. El óvulo, una vez introducido en la vagina, se disuelve, por lo que puede producirse un flujo blanquecino e inodoro. Si está embarazada o en período de lactancia, dado que no se han realizado estudios clínicos específicos, consulte a su médico antes de utilizar el producto.

CADUCIDAD Y ALMACENAMIENTO

La fecha de caducidad alude al producto mientras se encuentre en un envase intacto y almacenado correctamente. No utilice el producto después de la fecha de caducidad, ni tampoco en caso de que el envase esté abierto o dañado. Mantenga el producto sanitario alejado de la luz y del calor, preferiblemente a una temperatura de entre 4 °C y 25 °C. Evitar temperaturas superiores a 30 °C.

ELIMINACIÓN

Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los productos sanitarios caducados o que ya no se utilizan.

DISPOSICIONES PARA PRODUCTOS SANITARIOS DEL REGLAMENTO DE LA UE 2017/745

Debe comunicar al fabricante cualquier incidente grave que se produzca en relación con el producto sanitario a la siguiente dirección de correo electrónico: quality@farmaderma.it. Este informe también debe remitirse a la autoridad competente del Estado miembro en el que resida.

PRODUCTO SANITARIO  **0477**

Fecha de emisión de la última versión de las instrucciones de uso: 10/2022.



 **Fabricante: FARMA-DERMA s.r.l.**
Via dell'Artigiano 6-8 – 40010 Sala Bolognese (BO) – ITALIA (ITALY)

Distribuidor: LABORATORIOS RUBIÓ S.A.
Industria 29, Pol. Ind. Comte de Sert – 08755 Castellbisbal, Barcelona, ESPAÑA

Para los informes: complaints@labrubio.com