

- Este es un producto sanitario que puede adquirirse sin receta médica.
- Lea todo el prospecto detenidamente: contiene información importante para el consumidor.
- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Para más información o asesoramiento, consulte a su médico y/o farmacéutico.
- Si la sintomatología persiste después de un cierto tiempo, consulte a su médico.

# Cicatridina®

SAL SÓDICA DE ÁCIDO HIALURÓNICO 5 mg  
supositorios

## COMPOSICIÓN

Sal sódica de ácido hialurónico (5 mg), extracto lipólico de centella asiática, extracto lipólico de caléndula, extracto lipólico de aloe vera, aceite esencial de melaleuca, glicéridos semisintéticos, BHT.

## PRESENTACIÓN

El envase de venta contiene 10 supositorios de 2 g para uso rectal.

## QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA


CICATRIDINA supositorios desempeña su actividad gracias a la presencia de ácido hialurónico, un mucopolisacárido que se encuentra abundantemente distribuido en numerosos tejidos corporales. Gracias a su capacidad para retener agua, el ácido hialurónico forma una película que hidrata, acelera y mejora el proceso de reepitelización y reparación de los tejidos.

## INDICACIONES

Tratamiento adyuvante de procesos reparadores del canal anorrectal tras cirugía proctológica; hemorroides internas y externas; proctitis; criptitis; rágades anales; fisuras; fístulas perianales.

## CÓMO UTILIZARLO

Lávese las manos antes y después de utilizar el producto sanitario. Separe un supositorio del blíster usando la línea precortada. Extraiga el supositorio tirando de las dos hojas del blíster. Introduzca el supositorio en el recto.

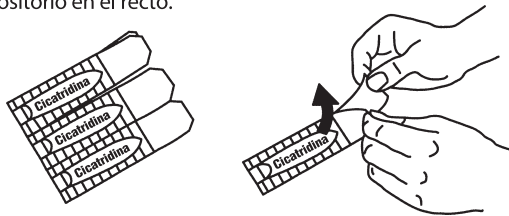

Adultos: utilice un supositorio al día o según prescripción médica, preferentemente por la noche antes de acostarse. Evite mantener el supositorio entre los dedos durante demasiado tiempo, ya que podría disolverse.

La duración del uso depende de la evolución de los síntomas; si es necesario CICATRIDINA supositorios puede utilizarse durante periodos prolongados, en cualquier caso después de 30 días de uso continuado interrumpir el tratamiento durante una semana.

**CUÁNDO NO DEBE UTILIZARSE**

No debe utilizarse en caso de hipersensibilidad individual a uno de los componentes del producto.

**INTERACCIONES CON OTROS PRODUCTOS**

Se desconocen interacciones con otros productos; por lo tanto, se recomienda que consulte a su médico antes de utilizar CICATRIDINA supositorios junto con otros productos sanitarios o medicamentos de uso rectal.

**EFFECTOS NO DESEADOS**

El empleo de cualquier producto de uso tópico, especialmente si es prolongado, puede causar sensibilización. Si esto ocurre, o si se observan otros efectos secundarios, suspenda el tratamiento y consulte a su médico o farmacéutico.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

El producto es sólo para uso rectal. Mantenga fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos. No lo trague. Si está embarazada o en período de lactancia, dado que no se han realizado estudios clínicos específicos, consulte a su médico antes de utilizar el producto.

**CADUCIDAD Y ALMACENAMIENTO**

La fecha de caducidad alude al producto mientras se encuentre en un envase intacto y almacenado correctamente. No utilice el producto después de la fecha de caducidad ni tampoco en caso de que el envase esté abierto o dañado. Mantenga el producto sanitario alejado de la luz y del calor, preferiblemente a una temperatura de entre 4°C y 25°C. Evitar temperaturas superiores a 30 °C.

**ELIMINACIÓN**

Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los productos sanitarios caducados o que ya no se utilizan.

**DISPOSICIONES PARA PRODUCTOS SANITARIOS DEL REGLAMENTO DE LA UE 2017/745**

Debe comunicar al fabricante cualquier incidente grave que se produzca en relación con el producto sanitario a la siguiente dirección de correo electrónico: [quality@farmaderma.it](mailto:quality@farmaderma.it). Este informe también debe remitirse a la autoridad competente del Estado miembro en el que resida.

**PRODUCTO SANITARIO**  0477

Fecha de emisión de la última versión de las instrucciones de uso: 10/2022.



Consultense las instrucciones de uso



Fecha de caducidad



Código de lote



Fabricante



Identificador único del producto (UDI)



**Fabricante: FARMA-DERMA s.r.l.**

Via dell'Artigiano 6-8 – 40010 Sala Bolognese (BO) – ITALIA (ITALY)

**Distribuidor: LABORATORIOS RUBIÓ S.A.**

Industria 29, Pol. Ind. Comte de Sert – 08755 Castellbisbal, Barcelona, ESPAÑA

Para los informes: [complaints@labrubio.com](mailto:complaints@labrubio.com)